



INSTRUMENTS

DENTASEPT®

3H Rapide

INDICATIONS

Dentasept® 3H Rapide est une solution concentrée détergente désinfectante pour le traitement de l'instrumentation dentaire, avant sa stérilisation.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Formulation oléochimique – contient des agents détergents facilement biodégradables
- ✓ Dilution très économique à 2% – 1 litre de concentré = 50 litres de solution prête à l'emploi
- ✓ pH neutre – compatible avec tous types de matériaux
- ✓ Excellentes propriétés microbiologiques
- ✓ Peut être utilisé en bacs à ultrasons
- ✓ Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 10 min.
Tuberculocide : EN 14563 – 30 min.
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 10 min.
Actif sur : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus et Influenza virus H1N1 - 5 min.

COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorure de didécyltriméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, parfum et colorant.

CONDITIONNEMENT

Flacon doseur d'1 litre.
Bidon de 5 litres avec pompe doseuse.



INSTRUMENTS

DENTASEPT® 3H Rapide

PROTOCOLE D'UTILISATION


Dentasept® 3H Rapide est une solution concentrée détergente désinfectante pour le traitement de l'instrumentation dentaire, avant sa stérilisation.

AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

COMMENT L'UTILISER

- 1 Diluer Dentasept® 3H Rapide à 2% (20ml par litre d'eau).
Flacon d'1 litre : Remplir le doseur jusqu'à l'indicateur 20ml.
Bidon de 5 litres : 1 pression de pompe.
- 2 Immerger les instruments totalement dans la solution, couvrir et laisser tremper en respectant un temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- 3 Retirer les instruments de la solution et vérifier qu'il n'y ait pas de débris visible. Si nécessaire, les brosser.
- 4 Rincer à l'eau courante ou par immersion.
- 5 Sécher les instruments et les préparer à la stérilisation.

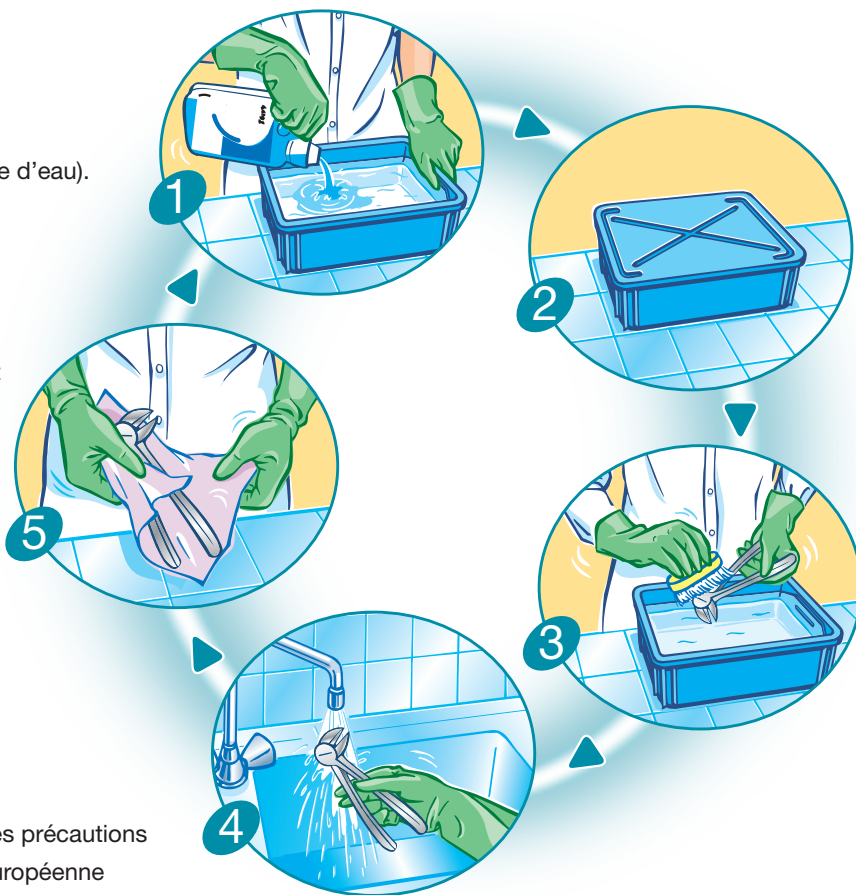

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire la Fiche de Données de Sécurité pour les précautions d'utilisation relatives au produit. Selon la directive Européenne 99/45/EEC et ses adaptations, Dentasept® 3H Rapide est classé comme une préparation dangereuse.

Renouveler la solution toutes les 24 heures. Conserver entre +5°C et +35°C.