

# ANIOSYME X3



Détergent  
pré-désinfectant  
de l'instrumentation



- Formule brevetée
- Détergence ultra haute performance
- Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes
- Non corrosif vis-à-vis des matériaux


## INDICATIONS

- Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie.
- Nettoyage en bacs à ultrasons.

## CARACTERISTIQUES

- Complexe tri-enzymatique combiné à un tensioactif non ionique nouvelle génération
- Efficacité démontrée (PND\*) \* Pouvoir Nettoyant Dégraissant
- Stabilité enzymatique prouvée
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium
- Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux
- Compatible avec les ultra-sons
- Liquide limpide bleue
- pH à dilution (0.5%) en eau de réseau : environ 7.5
- Réduction de 57% d'émissions des gaz à effet de serre comparé à un produit de même indication

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml > 5L

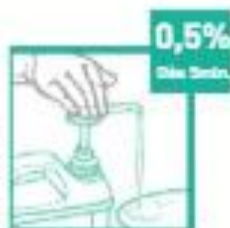



# ANIOSYME X3


Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

## MODE D'EMPLOI



### 1 Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

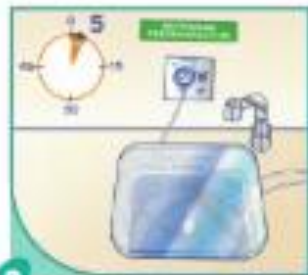

2 Immerger complètement le dispositif médical.  
**Temps de trempage minimum conseillé : 5 min.**  
 Brosser si nécessaire.  
 Pour le matériel endoscopique :  
 Double nettoyage 10 + 5 minutes.  
 Ecoovillonneur



3 Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique).  
 Pour le matériel endoscopique :  
 l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.



4 Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

## COMPOSITION

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : de +5°C à +35°C.

Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

## CONDITIONNEMENTS

200 doses de 25ml ..... Réf. 2633.097

12 flacons de 1 litre avec doseur incorporé..... Réf. 2633.095

4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml..... Réf. 2633.036

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 14561 BMR selon EN 13727	5 min. / 0,5%
Levures	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 min. / 0,5%
Virus	Selon EN 14476 : actif sur HIV 1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus	5 min. / 0,5%

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.



